

## SILIKONOWE CEWNIKI ZEWNĘTRZNE

### ULTRA FLEX i WIDE BAND

- pewne zabezpieczenie przy nietrzymaniu moczu
- eliminują ryzyko podrażnień skóry
- w całości wykonane z silikonu
- jednoczęściowe łatwe w zakładaniu
- większa wygoda i zdrowa skóra



**ULTRA FLEX** przezroczysty, elastyczny, o standardowej długości i szerokości przylepca.

**WIDE BAND** powierzchnia przylepca o szerokości 7,5 cm, czyli o 70% większa niż w cewnikach tradycyjnych.

Rozmiar	Kod
25 mm	33301
29 mm	33302
32 mm	33303
36 mm	33304
41 mm	33305

Rozmiar	Kod
25 mm	36301
29 mm	36302
32 mm	36303
36 mm	36304
41 mm	36305

### NATURAL

**Nowość!**

- w 100% silikonowy
- dwuczęściowy cewnik pozbawiony części przylepnej, posiada zewnętrzny pasek mocujący
- przejrzysty, bezzapachowy, "oddychający"
- rozmiary: średnica 25, 29, 32, 36, 41mm zalecany dla pacjentów:
- uczulonych na lateks i substancje zawarte w częściach przylepnych
- zmieniających cewnik kilka razy w ciągu dnia
- samocewnikujących się




## TERAZ MOŻESZ KONTROLOWAĆ NIETRZYMANIE MOCZU

### Prawidłowe stosowanie samoprzylepnych zewnętrznych cewników Ultra Flex i Wide Band

**Rozmiar:** wybierz odpowiedni rozmiar cewnika. Prawidłowy dobór rozmiaru zapewnia maksymalny komfort i zmniejsza konieczność wcześniejszego zdjęcia cewnika.



**Usuwanie owłosienia:** Usuń zbędne owłosienie.

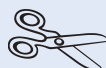

**Umyj prącie:** skóra musi być czysta i dobrze osuszona. Umyj prącie delikatnym mydłem i ciepłą wodą, osusz ręcznikiem.



**Zakładanie:** umieść zrolowany cewnik nad końcem prącia, powoli i starannie rozwiń cewnik zostawiając wolną przestrzeń między żołądkiem prącia, a ujściem cewnika tak, aby nie dochodziło do podrażnienia prącia i zatkania ujścia cewnika.



**Wyglądanie:** wygładź wszelkie nierówności. Delikatnie przyciśnij cewnik do prącia, aby zapewnić przyleganie do skóry. Jeśli przylepiec nie został właściwie przylepiony do skóry czas noszenia może zostać znacznie skrócony. Uwaga: zbyt wiele nierówności na cewniku może świadczyć o nieprawidłowym doborze rozmiaru, mniejszy cewnik będzie bardziej skuteczny.



**Połączenie z workiem do zbiórki moczu:** poprzez łącznik połącz cewnik z workiem. Jeden koniec łącznika włóż do ujścia cewnika, drugi do drenu worka. Dren worka może zostać skrócony przez ucięcie do wymaganej długości. Przymocuj worek do łydki lub uda w zależności od twojej aktywności i stroju. Worek do zbiórki moczu musi być wymieniany lub opróżniany przed pełnym napełnieniem. Pełny worek może stać się niewygodny, a nawet ściągnąć cewnik.



**Czas noszenia:** czas noszenia jest różny w zależności od użytkownika. Zaleca się zmianę co 24 godziny.



**Zdejmowanie:** rozepnij paski mocujące worek na nodze. Odłącz cewnik od worka. **Zdejmowanie cewnika:** delikatnie zroluj cewnik z prącia.



**Pofam - Poznań**

**Pofam-Poznań Sp. z o.o.** 60-573 Poznań, ul. Lindego 6  
tel. (061) 841-16-12, fax. (061) 841-16-11  
infolinia 0801 30-55-77, [www.pofam.poznan.pl](http://www.pofam.poznan.pl)  
e-mail: [office@pofam.poznan.pl](mailto:office@pofam.poznan.pl)